

WOUND CARE DryMax[®]

NON STERILE


DryMax Non Sterile är ett följsamt och superabsorberande förband för vätskande sår. DryMax Non Sterile absorberar och behåller vätskan inuti förbandet. Sårexsudat absorberas vertikalt i förbandet och förvandlas till en gel, vilket minskar risken för maceration.

DryMax Non Sterile


DryMax Non Sterile ska användas som ett sekundärt sårförband. Det har en enkel design med absorption från båda sidor vilket omöjliggör felanvändning. Denna egenskap gör även förbandet staplingsbart, så att flera förband kan placeras ovanpå varandra om extra hög absorptionskapacitet skulle krävas.

Förbandet känns torrt och behagligt för patienten samtidigt som det bidrar till en fuktig sårhelingsmiljö. Den hydrofila kontaktytan transporterar effektivt vätskan bort från primärförbandet. Vätskan fördelas jämnt in i förbandets kärna, ABSORBEST core.


Förbandets supertunna och mjuka egenskaper gör att det passar på alla platser på kroppen. DryMax Non Sterile är utvecklad för att fungera väl tillsammans med kompressionsbehandling.

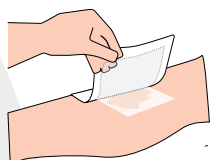

Förbandet placeras i nära kontakt med ett passande primärförband.

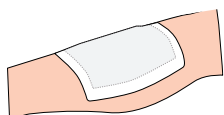

Fäst förbandet med bandage, film eller tape.

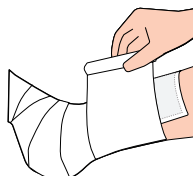

DryMax Non Sterile kan kombineras med kompressionsbehandling.



- Kostnadseffektiv
- Användarvänlig
- Ökad patientkomfort
- Bättre sårhelning



Artikel	Artikelnummer MediCarrier	Ant./frp.	Produkt- storlek (cm)	Absorptions- kapacitet*
DryMax Non Sterile 10x10 cm	97523	10	10x10	50 ml
DryMax Non Sterile 10x15 cm	97524	10	10x15	95 ml
DryMax Non Sterile 10x22 cm	97525	10	10x22	150 ml
DryMax Non Sterile 15x20 cm	97526	10	15x20	170 ml
DryMax Non Sterile 20x22 cm	97527	10	20x22	300 ml
DryMax Non Sterile 20x30 cm	97528	10	20x30	400 ml
DryMax Non Sterile 37x56 cm	97529	10	37x56	1600 ml



*) Enligt internationell standard EN-13726-1



Tillverkad i Sverige av ABSORBEST AB
www.absorbester.se | info@absorbester.se



PL80-c