

Manuel d'utilisation Synapse plateforme

Modules analyse d'ordonnance



Module **Gériatrie STOPP**

USAGE ATTENDU

Le module "**Gériatrie STOPP**" favorise le bon usage du médicament par la sécurisation des prescriptions chez les patients âgés de plus de 65 ans.

Ce module est à destination des professionnels de santé impliqués dans **la prise en charge médicamenteuse des patients** (médecins, pharmaciens, infirmières, sage-femme, dentiste etc.).

Il permet de connaître les médicaments potentiellement inappropriés chez les patients âgés de plus de 65 ans ainsi que les recommandations associées.

Les données sont issues de la deuxième version des critères STOPP/START¹

PRÉ-REQUIS AVANT UTILISATION

Aucune formation n'est nécessaire avant l'utilisation de ce module.

Les exigences minimales nécessaires pour faire fonctionner ce module comme prévu sont décrites dans la fiche technique.

MODALITÉS D'UTILISATION

Une fois les médicaments de l'ordonnance saisis, cliquez sur le bouton "**Gériatrie STOPP**". Pour chaque médicament concerné, les critères STOPP s'affichent.



The screenshot shows a navigation bar with four tabs: 'Interactions', 'Terrains', 'Gériatrie (STOPP)', and 'Effets indésirables'. The 'Gériatrie (STOPP)' tab is selected and highlighted with a red border. Below the navigation bar, the main content area displays the title 'Situations devant conduire à un arrêt de traitement pour les + de 65 ans' and a warning: 'Attention : les résultats obtenus dépendent des informations renseignées (médicaments et profil patient)'. The first medication listed is 'Digoxine : DIGOXINE NATIVELLE 0,25 mg'. Below this, two red arrows point to the following criteria: 'Décompensation d'une insuffisance cardiaque avec FEVG conservée' and 'Dose ≥ 250 µg/j si insuffisance rénale sévère (DFG (débit de filtration glomérulaire) < 30ml/min)'. The background of the content area is light blue.

¹O'Mahony, D., et al., STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2

Module **Gériatrie STOPP**

MISES EN GARDE

Les résultats fournis dépendent directement des **données renseignées préalablement** (liste des médicaments, profil patient). Veillez à vous assurer de l'exactitude des informations renseignées pour des résultats fiables.

INFORMATIONS EN CAS DE PROBLÈME

Toute réclamation ou dysfonctionnement en lien avec le dispositif doit nous être notifié à l'adresse contact@synapse-medicine.com

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES



Fabricant :

Synapse Medicine

3 rue Lafayette 33 000 Bordeaux

Dispositif médical Classe I 

Notice Module Gériatrie STOPP-PRO - version Juillet 2021